

LUNA 
GUIDE D'INSTALLATION

1 Sommaire

Bonjour et bienvenu dans ce guide d'installation, dédié à la mise en marche et à la prise en main du LUNA IP. Veuillez suivre attentivement ses instructions pour vous assurer d'effectuer cette installation dans les meilleures conditions.


CONTENU DU PACK	2
INSTALLATION EN MODE IP	3
INSTALLATION EN MODE RTC	5
PHASE DE TEST	6
ASSOCIATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE	7
SUPPRESSION DES PÉRIPHÉRIQUES	8
TYPES DE COMMANDES	9
DÉFINITION DES SIGNAUX LUMINEUX	10

2 Contenu du pack



- 1 **LUNA IP**⁽¹⁾
- 2 **MÉDAILLON**⁽²⁾
- 3 **CÂBLE TÉLÉPHONIQUE**⁽³⁾
- 4 **PRISE GIGOGNE**⁽⁴⁾
- 5 **CÂBLE ETHERNET**⁽⁵⁾
- 6 **BLOC D'ALIMENTATION**⁽⁶⁾

N'utiliser que la version fournie

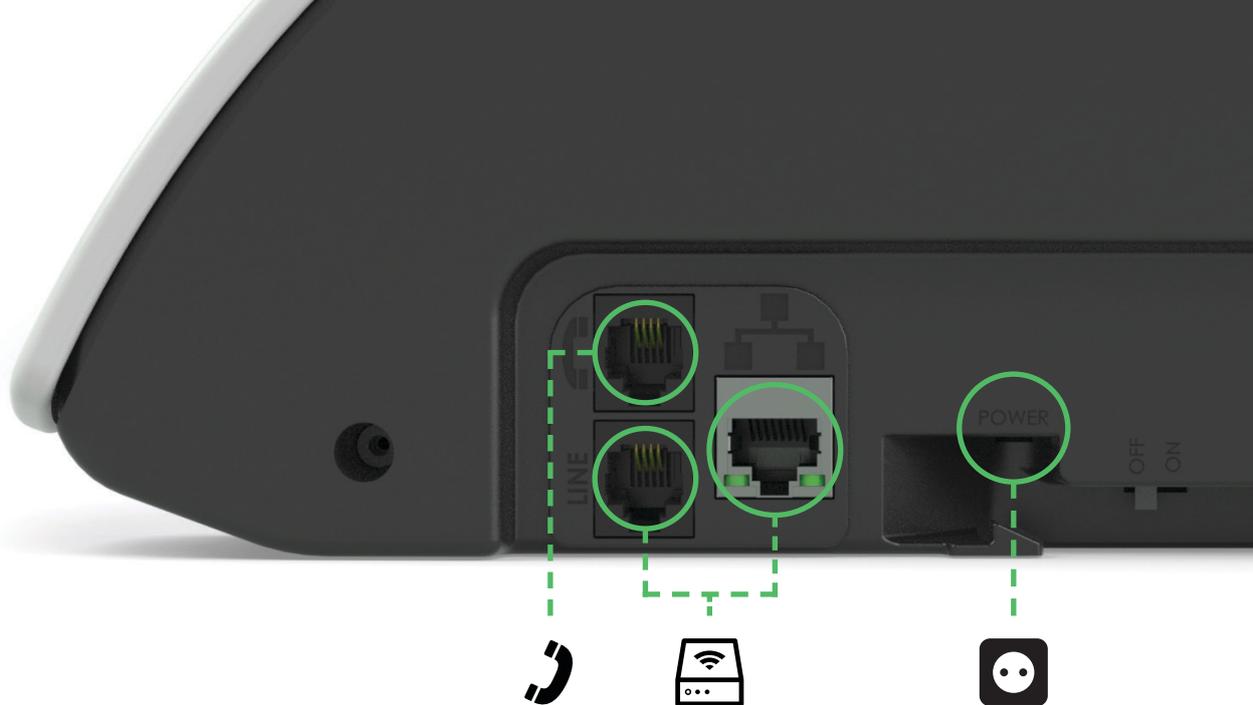

3 Installation en mode IP

1. Branchez le **téléphone** de l'abonné sur le port .
2. Branchez le **câble téléphonique**⁽³⁾ sur le port **LINE**, puis sur le port téléphone de la box internet.
3. Branchez un **câble ethernet**⁽⁵⁾ sur le port , puis sur un port ethernet de la box internet.
4. Branchez le **bloc d'alimentation**⁽⁶⁾ sur le port **POWER**, puis sur une prise secteur.
5. Verrouillez le câble d'alimentation à l'aide du crochet anti-traction.

ATTENTION : Le LUNA IP n'est pas compatible POE (Power over ethernet). Il ne doit pas être connecté derrière un switch / routeur POE, sinon risque de dégradation irréversible.

Lorsque le LUNA est branché en mode RTC uniquement, et que vous souhaitez le basculer en mode IP (branché derrière une box internet), il est impératif d'éteindre le LUNA IP avant de le débrancher pour ensuite effectuer la connexion à la box internet.

Redémarrez finalement le LUNA IP afin de prendre en compte la nouvelle configuration du matériel.




6. Appuyez et maintenez le bouton  tout en positionnant l'interrupteur ON/OFF sur ON.
7. Relâchez le bouton à l'écoute d'un signal sonore (6 bips successifs), signifiant le démarrage de l'initialisation.

Patiencez quelques minutes pendant la phase de paramétrage.

Le bon déroulement de la phase d'initialisation sera indiqué par 3 bips sonores.

En cas d'erreur (signal sonore de 5 bips), renouvelez l'étape précédente.

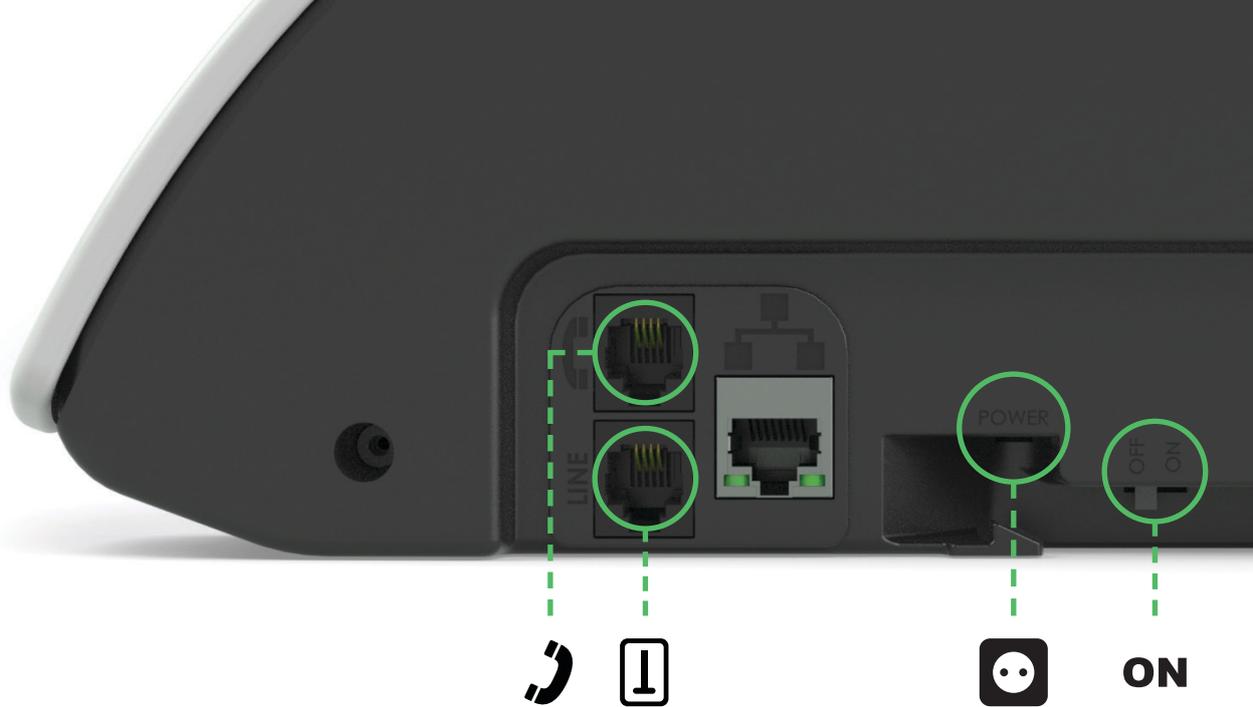

4 Installation en mode RTC

1. Branchez le **téléphone** de l'abonné sur le port .
2. Branchez le **câble téléphonique**⁽³⁾ sur le port **LINE**, puis sur une prise téléphonique.
3. Branchez le **bloc d'alimentation**⁽⁶⁾ sur le port **POWER**, puis sur une prise secteur.
4. Verrouillez le câble d'alimentation à l'aide du crochet anti-traction.
5. Positionnez l'interrupteur **ON/OFF** du LUNA sur **ON**.

5 Phase de test

**Le paramétrage est terminé lorsque le voyant frontal est allumé de façon fixe et le voyant  reste éteint.
Le LUNA IP est alors prêt à être utilisé.**

Appuyez sur le bouton du médaillon fourni avec le LUNA IP pour déclencher un appel d'urgence, qui aboutit sur un passage en communication audio avec le centre d'appel de téléassistance.

Après installation, laissez le LUNA IP branché sur secteur au minimum 24 heures, pour garantir l'autonomie de fonctionnement des batteries en cas de coupure de courant.





6 Association d'un périphérique

1. Appuyez simultanément sur les boutons  et  jusqu'au signal sonore pour activer le mode association.
2. Appuyez sur le médaillon ou le périphérique pour l'enregistrer. La réussite de cette étape est indiquée par le clignotement du bouton  et par un signal sonore.
3. Appuyez de nouveau sur les boutons  et  jusqu'au signal sonore pour sortir du mode association.



7 Suppression des périphériques

1. Appuyez simultanément sur les boutons 📞 et ✉️ jusqu'au signal sonore pour activer le mode association.
2. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton 📶 jusqu'à l'écoute d'un signal sonore, indiquant la dissociation de tous les périphériques.
3. Appuyez de nouveau sur les boutons 📞 et ✉️ jusqu'au signal sonore pour sortir du mode association.

8 Types de commandes

APPEL CONVIVAL

- Appuyez pour appeler le numéro pré-enregistré.
- Rappuyez pour raccrocher.

MODE ABSENCE

- Appuyez longuement jusqu'au signal sonore.
- Rappuyez pour notifier de votre retour.

APPEL D'URGENCE

- Appuyez sur le bouton central ou sur le médaillon pour entrer en contact avec le centre d'appel de téléassistance.

MESSAGES VOCAUX

- Appuyez pour écouter les messages enregistrés.



9 Définition des signaux lumineux



FIXE

Appel convivial en cours ou mode absence activé.

CLIGNOTEMENT

Numérotation des appels conviviaux.



FIXE

Appel d'urgence en cours.

CLIGNOTEMENT

Transmetteur en cours de communication avec le serveur de téléassistance.



CLIGNOTEMENT

Messages vocaux en attente d'écoute.



SIMULTANÉ

Ligne téléphonique débranchée.

ALTERNÉ

Mode association d'un périphérique radio.



FIXE

Présence secteur.

CLIGNOTEMENT LENT

Coupure secteur et utilisation du transmetteur sur mode batterie.

CLIGNOTEMENT

Transmetteur en cours de communication avec la plateforme ATTENTIVE.



VOYANT ORANGE

Câble ethernet débranché.

VOYANT VERT + ORANGE

Câble ethernet connecté et fonctionnel.

