

\mathbf{O} A T T E N T I V E



Pairing via the MyATTENTIVE platform







Go into the client's fixed or mobile device file, click on **"Add a new device".** 2

Insert the medallion's **VID number** (digits only). Click the green button to confirm. If a line appears in the drop-down menu, select it.



Cli

3

Click on **"supervision"** for the M5 medallion.





Click on **"specific configuration"** to set up advanced functionalities.

M5 Specific configuration

pecific configuration pendant 5 PSCID: 75c3c22c-4426-4bc3-6374-30296256bac8 VID: 5243565 CID: 00420000	
Protocol V5	
arms	

Advanced functions are configured remotely from your platform or the MyATTENTIVE app:

- ▷ Inactivity detection (time bracket)
- ▷ Activate the vibration option
- ▷ Indoor tracking (Beacon)
- ▷ Firmware update

Location of the person	None	
utomatic alarms		
Detection mode of the p	person's inactivity Timeslot	0
neslot		
20h 01h 02h 03h	0en 06n 00n 00n 0en 10n 11n 12n 13n 14n 15n 10n 17n 10n 19n 20n 21n 22n 2	3n
Durée d'annulation d'un	ne alarme automatique 10 8	
Durée d'annulation d'ur	ne alarme automatique 10 s	
Durée d'annulation d'un Activation du vibreur	ne alarme automatique 10 s YES	
Durée d'annulation d'un Activation du vibreur Sensibilité du vibreur	e alarme automatique 10 s YES Average	
Durée d'annulation d'un Activation du vibreur Sensibilité du vibreur Person's activity	e alarme automatique 10 8 YES Average	
Durée d'annulation d'un Activation du vibreur Sensibilité du vibreur Person's activity Person's activity monito	e alarme automatique 10 s YES Average NO NO	0
Durée d'annulation d'un Activation du vibreur Sensibilité du vibreur erson's activity Parson's activity Sensitivity of the activity	e alarme automatique 10 8 YES	0
Durée d'annulation d'un Activation du vibreur Sensibilité du vibreur Person's activity Person's activity Sensitivity of the activity	e alarme automatique 10 5 YES	0

Our support team is here to help you, contact us at support@atentve-telecare.com