\mathbf{O} A T T E N T I V E

Appairage manuel via Luna fixe

2

Ą



Appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux jusqu'au signal sonore.



Appuyez une seule fois sur le bouton du M5.



Une led rouge clignote sur votre M5 et votre Luna émet un signal sonore. L'étape d'appairage est réussie.



Ré-appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux jusqu'au signal sonore pour sortir du mode appairage.

Appairage via la plateforme MyATTENTIVE







Accédez à la fiche du produit fixe ou mobile de l'abonné, cliquez sur **«ajouter un nouveau périphérique»**.



3

Cliquez sur **«supervision»** du médaillon M5



Insérez le numéro **VID** du médaillon (chiffres uniquement). Cliquez sur le bouton vert pour valider. Si une ligne apparaît sur le menu déroulant, sélectionnez-là.





Cliquez sur **«configuration spécifique»** pour paramétrer les fonctionnalités avancées.

Configuration spécifique M5

Configuration spécifique Médaillon 5 ps	CID: 75c3c22c-4426-4bc3-8374-30296256bac8	VID: 5243565 CID: 00420000
Protocole V5		
Alarmes		
Durée de prise en compte de l'appui bouton	100 ms	

Les fonctions avancées sont paramétrées à distance depuis votre plateforme ou l'application MyATTENTIVE :

- ▷ Détection d'inactivité (plage horaire)
- ▷ Activation de l'option vibreur
- ▷ Géolocalisation en intérieur (Beacon)
- ▷ Mise à jour du Firmeware

Localisation de la personne	Aucune	Aucune		
larmes automatiques				
Mode de détection de l'ina	ctivité de la personne	Plage horaire		0
flage horaire				
00h 01h 02h 03h 04h	05h 08h 07h 0	3h 03h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 18h 18h 1	n 18h 19h 20h 21h 22h 2	23h
Durée d'annulation d'une a	arme automatique	10 S		
Activation du vibreur Ol	Л			
Sensibilité du vibreur M	oyenne			
Activité de la personne				
Suivi d'activité de la persor	ne NON			0
Sensibilité du capteur d'ac	ivité Moyenne			
			Annuler Sauvegi	arder

Notre équipe support est là pour vous aider, contactez-nous à support@attentive-telecare.com